

TRANSPORTNÉ KRESLO CHPK



Pojazdné kreslo je určené do sanitných vozidiel prevozného typu. Používa sa na prepravu imobilných pacientov.

Konštrukcia kresla je zhotovená z ľahkých duralových profilov, v kombinácii s oceľovými tvarovkami. Kreslo má spredu aj zozadu po dve vysúvateľné rukoväte pre ľahšiu manipuláciu s pacientom. Rukoväte sú použité s protišmykovým povrchom. Rám kresla je položený na štyroch kolieskach, uložených v klzných puzdrách. Dve zadné kolieska sú otočné okolo zvislej osi.

Samotné kreslo je robustnej konštrukcie, pre pohodlné sedenie, anatomicky tvarované s umývateľným koženkovým povrchom.

Po bočných stranách kresla sú umiestnené ramenné opierky - zábrany, zamedzujúce nakloneniu, alebo vypadnutiu pacienta. V prednej časti pojazdného kresla je umiestnená nožná opierka pre pacienta.

Zo spodnej časti sedačky presahujú dva vodiace kolíky s vyfrézovaným osadením, ktoré slúžia na rýchlu aretáciu k podlahe vozidla, pomocou prídavnej upevňovacej konzoly, ktorá má pozdĺžnu drážku pre tieto kolíky. Konzola je pevne primontovaná k podlahe vozidla.

Aretácia proti vysunutiu je zabezpečená zámkom, v ktorom sa pohybuje vodiaci kolík v tvare páčky, dotláčaný pružinou. Odistenie uzamknutia sa vykonáva jednoduchým vysunutím páčky, prekonaním odporu pružiny. Uzamykanie je súčasťou konzoly na podlahe vozidla.



Povrchová úprava všetkých kovových častí kresla je vykonaná s ohľadom na časté používanie kresla i na jeho čistenie.

Pojazdné kreslo je možné v konzole zaistiť priamo do podlahy vozidla v zadnej časti vozidla

Údržba pojazdného kresla spočíva najmä:

- v čistení sedacej a operadlovej časti (koženky) bežnými saponátovými prostriedkami
- v občasnom premazaní vodiacich puzdier výsuvných rúkovieí
- v skontrolovaní skrutkových spojov a prípadných deformácií kovových častí spôsobených nárazom a pod..

