

TRANSPORTNÉ NOSIDLÁ CHNP

S DURALOVÝM PODVOZKOM



Nosidlá so samosklopným podvozkom CHNP
Komplet nosidlá so samo-sklopným podvozkom sú základnou výbavou sanitných vozidiel. Sú určené na presun ležiacich pacientov k sanitnému vozidlu, pre dopravu priamo v sanitnom vozidle a do zdravotníckeho zariadenia. S týmto kompletom môžeme pacienta bez prekladania dopraviť z miesta primárneho zásahu až do miesta odborného vyšetrenia. Umožňuje to konštrukcia sklápacích nôh, ktoré sa po vysunutí zo sanitného vozidla automaticky sklopia do zvislej polohy, čím vznikne nezávislá jednotka pre presun pacienta.

Komplet je v sanitnom vozidle v zloženom stave, upevnený na plošine pod nosidlá. Pri vyberaní kompletu z vozidla obsluha odistí zámok na pravej strane a potiahne nosidlá s podvozkom. Pri vysúvaní sa zadné i predné nohy podvozku automaticky sklopia a zaistia v rozloženej polohe. Obsluha je povinná skontrolovať zaistenie predných i zadných nôh podvozku pred presunom pacienta.

Pri zasúvaní kompletu do sanitného vozidla obsluha nasmeruje predné kolieska podvozku na sklopenú plošinu tak, aby sa predné nohy podvozku dotkli nábehových valčiek plošiny. Obsluha pritiahnutím páky na pravej strane nosného rámu uvoľní predné nohy podvozku, ktoré sa zasúvaním podvozku do sanitného vozidla začnú sklápať. Pritiahnutím páky na ľavej strane nosného rámu obsluha uvoľní zadné nohy podvozku a zasunie komplet do vozidla. Obsluha potom zasunie plošinu a skontroluje či je zaistená.





V prípade presunu pacienta v ťažšie dostupných miestach, môžeme nosidlá z podvozku uvoľniť a použiť samostatne. Odistenie nosidiel od podvozku sa vykonáva pri rozloženom a zabrzdenom podvozku. Odistovacia páka je na ľavej strane nosného rámu podvozku. Po odistení sa nosidlá uvoľnia potiahnutím dozadu. Nosidlá sa nemôžu upevniť v sanitnom vozidle bez podvozku. Nasadenie nosidiel sa vykoná tak, že vodiace kolieska sa nastaví na nosný rám podvozku a posunutím dopredu sa automaticky zaistia. Obsluha je povinná zaistenie skontrolovať.

Nosidlá majú výsuvné rukoväte (viď na strane č. 4) na prenášanie.

Rukoväte sa vytiahnu a otočením vpravo sa zaistia. Pri zasúvaní sa rukoväte pootočia vľavo a zasunú.

Dĺžka	Length	Länge	1955 mm
Šírka	Width	Breite	550 mm
Výška	Height	Höhe	840 mm
Hmotnosť	Weight	Gewicht	34 kg
Nosnosť	Load Capacity	Maximale Beladung	150 kg
Podvozok	Chassis	Chassis	1806 mm





- ① Ergonomický dizajn
- ② Sklopné bočnice, s odistením pomocou jednej ruky
- ③ Anatomický vankúš
- ④ 2 výškové pozície
- ⑤ Otočné nohy podvozku
- ⑥ Brzda ktorá sa ovláda nohou



Chrbtová časť nosidiel je polohovateľná a môžeme ju prestaviť až do polohy sediaceho pacienta. Mechanizmus na polohovanie má jednoduchý spôsob ovládania pomocou ovládacieho tlačidla na princípe teleskopického tlmiča. Nožná časť nosidiel je taktiež polohovateľná. Zaistenie sa vykoná samočinne v každej polohe pomocou západky, vrátenie do pôvodnej polohy sa vykoná zatiahnutím západky oproti zaistovacej pružine. Nosidlá majú pevnú opierku na nohy a sklopné rukoväte, ktoré sú zaistené len vo zvislej polohe. Odistenie sa vykonáva stlačením aretačnej guľôčky. Pri prevádzke výrobku je nutné dbať na čistotu klzných spojov a trecích plôch. Premazanie týchto pohybových plôch sa vykonáva silikónovým olejom.